

Wyrób medyczny: Pas obojczykowy Wersja: Prostotrymacz (opatrunek ósemkowy) (MEK 4004)

1. Opis:

- Wyrób wykonany jest z nowoczesnej elastycznej, oddychającej tkaniny, która zapewnia higroskopijność i niezawodne mikrokrążenie powietrza.
- Składa się z regulowanych pasków naramiennych, które krzyżują się między łopatkami.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 4 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Utrzymanie prawidłowej postawy w zakresie odcinka piersiowego kręgosłupa.
- Stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego i złamań obojczyka.
- Odciążenie aparatu więzadłowego obojczyka.

3. Wskazania do stosowania:

- Zachowawcze leczenie urazów obojczyka i stawu barkowo-obojczykowego.
- Rehabilitacja po leczeniu operacyjnym urazów obojczyka i stawu obojczykowo-barkowego.
- Zaburzenia postawy w zakresie piersiowego odcinka kręgosłupa.
- Choroby zwyrodnieniowo-dystroficzne górnego odcinka kręgosłupa piersiowego.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.

- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

5. Instrukcja obsługi:

1. Prostotrymacz należy zakładać na bawełnianą bieliznę.
2. Pasy przeprowadzić do przodu przez ramiona i pod pachami.
3. Należy wyregulować napięcie i zapiąć za pomocą rzepów.
4. Prawidłowo założona opaska odciąga ramiona do tyłu i unosi klatkę piersiową.
5. Rozmiar dobiera się na podstawie obwodu klatki piersiowej.

ROZMIAR	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
S	60-75cm
M	75-90cm
L	90-105cm
XL	105-120cm

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Prać łagodnymi detergentami w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.
- Podczas prania i płukania nie trzeć ani nie skręcać.
- Suszyć z dala od źródeł ciepła. Nie prasować. Nie wybielać (nie używać środków wybielających zawierających chlor).
- Nie czyścić na sucho środkami chemicznymi.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów

Lecznicych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01












MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



4004

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Wyprodukowano w Polsce
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Prostotrzymacz opatrunek ósemkowy MEK 4004

