

**Wyrób medyczny: Orteza stawu barkowego/
łokciowego/nadgarstka**
**Wersja: Stabilizator stawu nadgarstkowego
(MEK 6003)**
(z anatomiczną szyną usztywniającą)

1. Opis:

- Stabilizator wykonany jest z nowoczesnych, elastycznych i oddychających tkanin, które umożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza oraz komfortowe dopasowanie podczas aktywności fizycznej.
- Wyposażony we wstępnie anatomicznie uformowaną aluminiową szynę dłoniową zapewniającą znaczne usztywnienie i mocowanie stawu. Dwie dodatkowe grzbietowe fiszby wzmacniają stabilizację.
- Konstrukcja w formie rękawicy ułatwia zakładanie, a system pasów umożliwia regulację stopnia ucisku.
- Materiał zachowuje trwałość kształtu oraz właściwości kompresyjne nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Orteza dostępna jest w wersji na prawą lub lewą rękę.
- Wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego użytku, jednak z przyczyn higienicznych i medycznych powinien być stosowany wyłącznie przez jednego użytkownika.
- Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Zasady pielęgnacji znajdują się w punkcie 6.

2. Funkcje:

- Zapewnia znaczną stabilizację oraz kompresję stawu promieniowo-nadgarstkowego i stawów nadgarstka.
- Stabilizuje i odciąża aparat torebkowo-więzadłowy stawu nadgarstkowego.
- Zmniejsza ból.

3. Wskazania do stosowania:

- Stłuczenia, skręcenia i inne urazy stawu promieniowo-nadgarstkowego i stawów nadgarstka.
- Okres rehabilitacji po kontuzjach, operacjach i unieruchomieniu gipsowym.
- Zapalenie wyrostka rylcowatego, zapalenie stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów nadgarstka.

- Reumatoidalne zapalenie stawów lub inne stany zapalne stawów nadgarstka.
- Zespół cieśni nadgarstka.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

5. Instrukcja obsługi:

1. Rozepnij wszystkie paski na rzep Velcro.
2. Włóż rękę do rękawicy tak, aby szyna znajdowała się po stronie dłoniowej, a pętla odpowiednio obejmowała kciuk.
3. Przełóż paski przez odpowiednie pierścienie, dociągnij i zapnij na rzep.
4. W razie potrzeby skróć paski nożyczkami, aby uzyskać optymalne dopasowanie i właściwy stopień ucisku.

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA (cm)
S-M	13-17 cm
L	17-19 cm
XL	19-21 cm

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zabezpiecz wszystkie rzepy przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny
Wersja: prawa/lewa

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



6003

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Stabilizator stawu nadgarstkowego z anatomiczną szyną usztywniającą MEK 6003

